




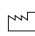


Los Componentes Protésicos para Implante Dental Esterilizados DENTOFLEX abarcan tres familias de productos: CERA-ONE (modelo paralelo), CICATRIZADOR (modelo paralelo, modelo con perfil de emergencia y modelo para Esteticono) y ESTETICONO (modelo angulado y modelo paralelo) cada un es utilizado sobre implantes de Hexágono Interno, Hexágono Externo, Cono Morse y Flex Los Componentes Protésicos para Implante Dentario Esterilizados DENTOFLEX son productos utilizados en el preparo y colocación de la prótesis dentária, fueron proyectados con la finalidad de guiar la cicatrización adecuada del tejido gingival peri implantar, y ofrecer resistencia a la presión y fuerzas laterales ejercidas sobre el implante. Debiendo solamente ser manoseado por profesionales especializados.

**Simbología Norma NF EN 980:**


 Fabricación
  Validación
  LOT N° de lote
  Ver las instrucciones de uso
  Producto de Uso Único
  Almacenar en lugar seco fresco y libre de la luz del sol

**Indicación de Uso:**

CERA ONE	El cera-one es un muñon con un espacio interno cilíndrico (hueco y liso) y con forma externa hexagonal, para ser utilizado en prótesis unitárias cementadas. siendo todos de modelo paralelo. Fué especialmente proyectado para ofrecer mayor resistencia a la presión ejercida sobre el implante, en el caso de prótesis unitárias, fijar el tornillo con auxilio de una llave para torquímetro y un torquímetro para prótesis, con torque de 30 a 32 N..			
CICATRIZADOR	El cicatrizador es utilizado en la segunda fase de una cirugía de implantes, con la finalidad de guiar la cicatrización adecuada del tejido gingival perimplantar, moldando el espacio de la prótesis dentária en la encía del paciente y fijarlo manualmente con auxilio de una llave	Para implante	PARALELO	Es identificado por dos medidas: diametro del implante (2,95 a 6,00mm) y altura del cicatrizador (3, 5 y 7mm) utilizado donde la estética no es factor preponderante.
			PERFIL DE EMERGENCIA	Es identificado por tres medidas: diametro del implante (2,95 a 6,00 mm), altura do cicatrizador (2 a 6 mm) y hancho del cicatrizador (5, 6 y 7,5 mm), utilizado donde la estética es factor preponderante.
		Para esteticonos	PARALELO	Es ofrecido con 5,0 mm de diametro y 6,5 mm de altura, utilizado para cubrir el esteticono, funcionando a un solo tiempo, como capa de cicatrización y tapadera.
			PERFIL DE EMERGENCIA	Es Ofrecido con 5,0 mm de diametro en la base, 6,0 y 7,5 en el <input type="checkbox"/> tope y todos 6,5 mm del altura, utilizado para cubrir el esteticono, funcionando a un solo tiempo, como capa de <input type="checkbox"/> cicatrizción y tapadera
ESTETICONE	El esteticono es un muñon compuesto de tres partes, para ser utilizado sobre implantes unitários y múltiplos, para prótesis atornilladas. Fué especialmente proyectado para ofrecer mayor resistencia a la presión ejercida sobre el implante, en el caso de prótesis unitárias o fijas. Fijar el tornillo con auxilio de una llave para torquímetro y un torquímetro para prótesis, con torque de 20N para el tornillo central y 10N para el micro tornillo.	Paralelo o angulado	GUANTE ANTI ROTACIONAL	Utilizada en protesis permanente atornillada unitaria
			GUANTE CIRCULAR	Utilizada en protesis permanente atornillada fija

**Composición:**

FAMILIA	MODELO	USO NO IMPLANTE	MATÉRIA PRIMA			DIÁMETROS		ALTURAS							MEDIDAS ESPECIFICAS																														
			COMPONENTE	PARAFUSO	COIFA	HI	HE	1	2	3	4	5	6	7																															
			TITÁNIO		POLIMERO																																								
CERA ONE	PARALELO	HI / HE / CM	F -136	F -136	POLIACETAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													
CICATRIZADOR	PARA IMPLANTE	PARALELO	FLEX	F - 67														X																											
		PERFIL DE EMERGENCIA																X	PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5																										
		PARALELO	CM	F -67																X	PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5																								
		PERFIL DE EMERGENCIA																		X	PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5																								
		PARALELO	HI	F -67																																									
		HE	X																					PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5																					
	PARALELO	HI	F -67																																										
	HE	X																						PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5																					
	PARA ESTETICONE	PARALELO	HI	F -136																																									
			HE																						X	PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5																			
PERFIL DE EMERGENCIA		HI	F -136																																										
		HE																							X	PERFIL 4,1/5,0/6,0/7,5																			
ESTETICONE	ANGULADO	CM	F -136																					ANGULOS 17/22/30																					
	PARALELO																							X	ANGULOS 17/22/30																				
	ANGULADO	HI / HE																																											
	PARALELO																																												

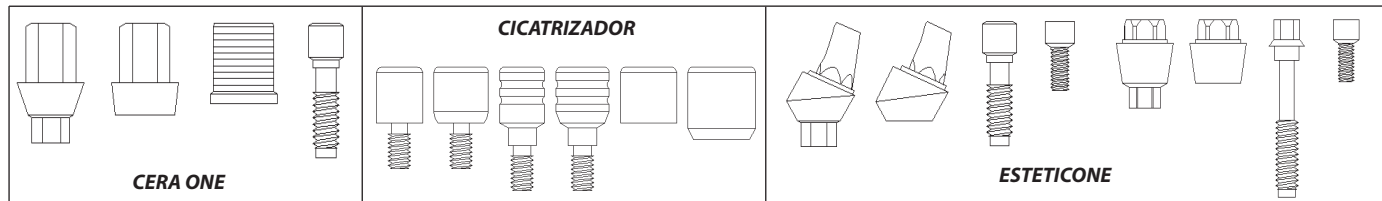**Accesorios:**

**CERA ONE** - llave para torquímetro y torquímetro para prótesis, son accesorios para colocación del cera one y vendidos separadamente.

**CICATRIZADOR** - llave digital, es un accesorio para colocación del cicatrizador y vendidos separadamente. □

**ESTETICONE** - llave para torquímetro y torquímetro para prótesis, son accesorios para colocación del esteticono y vendidos separadamente.

Guante Metálico Anti Rotacional para Esteticono, Guante Metálico Circular para Esteticono, Guante Plástico Anti Rotacional para Esteticono el Guante Plástico Circular para Esteticono, son accesorios para uso exclusivos del esteticono y vendidos separadamente.

**PRECAUCIONES**

Las técnicas restauradoras requisitadas para la realización de la prótesis sobre implante son altamente especializadas y envuelven procedimientos complejos. La selección impropia de componentes protéticos y o técnicas puede causar el fracaso del implante y la pérdida de la prótesis.

**RESTRICCIÓN**

La prótesis sobre implantes es inviabilizada cuando los implantes son posicionados extremadamente inclinados (encima de 35°, impidiendo que se consiga hacer correctamente la restauración dentaria).

**ADVERTENCIAS**

La condición original del producto, encuan to producto ESTÉRIL, solo se mantendrá encuan to su embalaje se mantenga inviolada y por tiempo declarado de validez de la esterilización. Para mantener su condición original, el embalaje debe ser abierto solamente durante la cirugía y en lugar esterilizado (campo quirúrgico).

Es concebido para USO ÚNICO garantiendo su desempeño máximo y PROHIBIDO REPROCESAR.

**CONTRA-INDICACIÓN**

Los Componentes Protéticos para Implante Dentario Esteriles deben ser utilizados apenas como indicado.

**DESCARTE DEL PRODUCTO**

Caso ocurra la necesidad de descarte del producto el profesional deberá seguir las leyes vigentes para descarte de producto contaminado.

**ESTERILIZACIÓN**

Los Componentes Protéticos para Implante Dentario Esterilizados ya embalados reciben un sello RADIOSENSIBLE en color amarillo el cual después del proceso el mismo deberá estar en el color rojo, debido al proceso de esterilización que es hecho con Rayos Gama Cobalto-60.

**ALMACENAMIENTO**

Los Componentes Protéticos para Implante Dentario Esterilizados deben ser almacenados en local limpio, seco, airado y libre de luz del sol.

**TRANSPORTE**

El embalaje protege el producto contra caídas y colisiones. Todavía, en transportes de larga distancia, el producto debe recibir

